



TRACOE silcosoft®

FITS TO KIDS

Weiche Tracheostomiekanüle aus Silikon für Neugeborene und Kinder

- Speziell verstärkte Schildösen
- Mit und ohne H₂O Cuff
- Eingebetteter Füllschlauch
- Längenvarianten ab Lager

TRACOE®



TRACOE silcosoft®

FITS TO KIDS

Weiche Tracheostomiekanüle

Die anatomischen Strukturen von Kindern sind höchst sensibel und reagieren äußerst empfindlich auf Manipulation und Kompression. Die kindliche Trachea ist schmal und sehr weich. Eine flexible, knickstabile und weiche Kanüle aus Silikon schont die Trachealschleimhaut und auch das Stoma. Der Silikonvorteil: weich, gut verträglich, flexibel, temperaturstabil, wenig anfällig für Verkrustungen, transparent und gut zu reinigen.

Die anatomischen Besonderheiten des großen Hinterkopfes und des kurzen Halses, vor allem bei Säuglingen, führen zu einer Anteflexion des Kopfes und erschweren den Zugang zum Tracheostoma. Proximal verlängerte Kanülen vermindern das Risiko von Druckstellen an Kinn und Brust und den Verschluss des Konnektors durch das Kinn. Außerdem bieten sie dem Kind mehr Bewegungsfreiheit und der 15 mm-Konnektor der Kanüle ist frei zugänglich.



Kein Einreißen!



- Patentierte, speziell verstärkte Schildösen verhindern ein Einreißen der Flügel durch ein Kanülenband z. B. mit Klettverschluss
- Verringert das Risiko einer Kanülen-dislokation

Eingebettet!




- Füllschlauch des Cuffs ist in dem Material der Kanülenwand eingebettet
- Tragekomfort – der Schlauch trägt nicht auf und ist nicht spürbar
- Vermindert das Risiko von Läsionen
- Mehr Platz für expiratorischen Luftstrom

Bündig und frei!



- Sensibilisierung, Lautierung oder Kommunikation im entblockten Zustand des H₂O Cuffs
- Größtmögliches freies expiratorisches Lumen zwischen Kanüle und Trachealwand
- Weicher, im entblockten Zustand bündig anliegender Wassercuff*


*Blocken z. B. mit der „Minimal Occlusive Volume“ Technik.

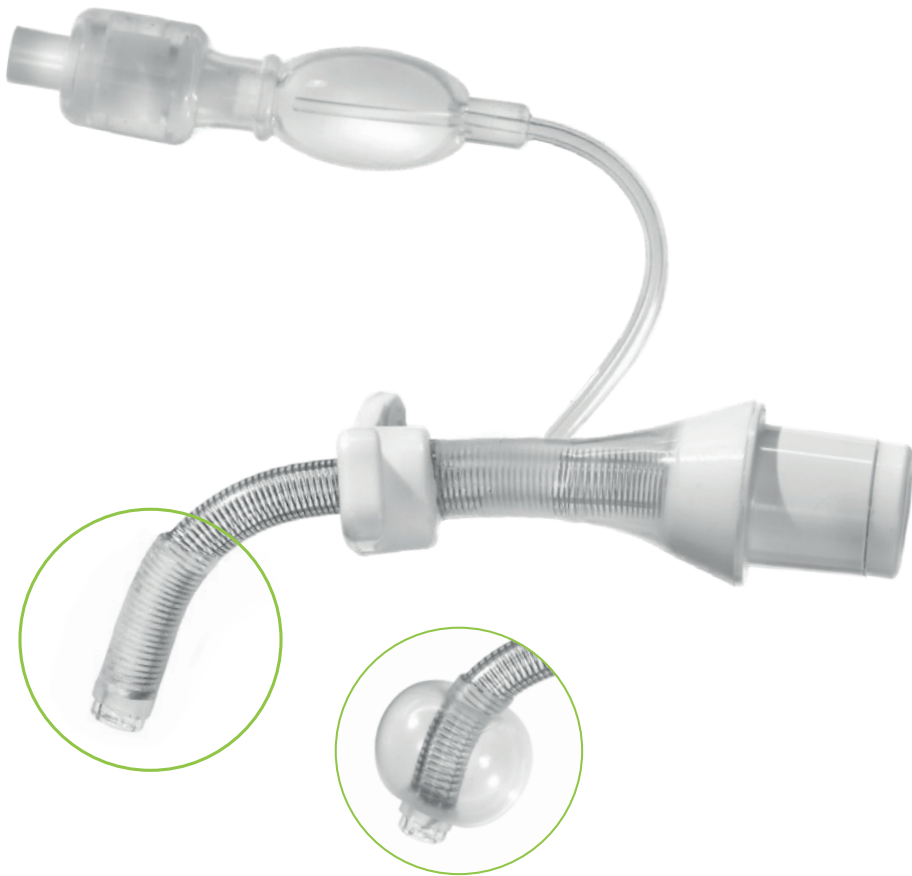

Unser Beitrag für das Wohlbefinden und die Sicherheit des Kindes ist die TRACOE silcosoft




Geschwungen!

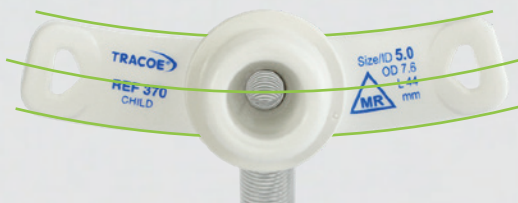


- Mit einer leicht nach oben geschwungenen, der kindlichen Anatomie angepassten Schildform
- Standardkanüle mit blauer Schildbedruckung
- Längenvariante mit grüner Schildbedruckung

Flexibel!

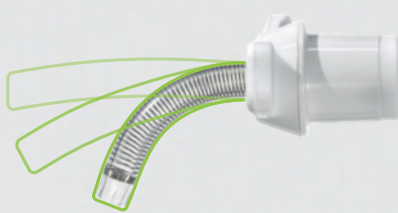

- Knickstabil und flexibel über die ganze Länge
- Formbeständig durch enge Wicklung der Nitinol-Spirale
- Sehr weiche Kanülenspitze (4 mm-Abstand bis zum Beginn der Spiralwicklung)
- MR conditional und röntgendicht

Ab Lager!

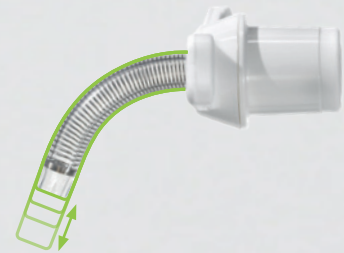

- Besonders die Kanülenlänge muss dem Wachstum laufend angepasst werden
- Beim Kind wächst eher die Kanülenlänge als die -größe mit
- Manchmal entscheiden Millimeter über eine gute Passung
- Viele Längenvarianten sind in Kürze ab Lager verfügbar

LIEFERUMFANG UND ABMESSUNGEN



Bewährter Ringobturator bei Standardlängen

- Gut greifbar für das sichere Einführen der Kanüle
- Große Ringöffnung ermöglicht die schnelle Entfernung



Formbarer Obturator als Einführhilfe bei

- Längenvarianten
- proximal längeren Kanülen



Trennhilfe

- zum Entfernen von Zubehör, das sich von Hand nur schwer vom Konnektor lösen lässt



Kanülenband für Kinder

- weiches, gepolstertes, längenverstellbares Halteband, mit Klettverschluss, zweiteilig

ohne Cuff

mit Cuff

REF 360	REF 361	REF 370	REF 371	REF 362	REF 363	REF 372	REF 373
neonatal	neonatal proximal länger	pädiatrisch	pädiatrisch proximal länger	neonatal	neonatal proximal länger	pädiatrisch	pädiatrisch proximal länger
Größe / ID / TL mm	Größe / ID / TL mm PL mm	Größe / ID / TL mm	Größe / ID / TL mm PL mm	Größe / ID / TL mm	Größe / ID / TL mm PL mm	Größe / ID / TL mm	Größe / ID / TL mm PL mm
2.5 / 30	2.5 / 30 / 15	2.5 / 38	2.5 / 38 / 20	2.5 / 30	2.5 / 30 / 15	2.5 / 38	2.5 / 38 / 20
3.0 / 32	3.0 / 32 / 17	3.0 / 39	3.0 / 39 / 20	3.0 / 32	3.0 / 32 / 17	3.0 / 39	3.0 / 39 / 20
3.5 / 34	3.5 / 34 / 20	3.5 / 40	3.5 / 40 / 25	3.5 / 34	3.5 / 34 / 20	3.5 / 40	3.5 / 40 / 25
4.0 / 36	4.0 / 36 / 22	4.0 / 41	4.0 / 41 / 25	4.0 / 36	4.0 / 36 / 22	4.0 / 41	4.0 / 41 / 25
		4.5 / 42	4.5 / 42 / 30			4.5 / 42	4.5 / 42 / 30
		5.0 / 44	5.0 / 44 / 30			5.0 / 44	5.0 / 44 / 30
		5.5 / 46	5.5 / 46 / 30			5.5 / 46	5.5 / 46 / 30

ID: Innendurchmesser (Lumen) der Kanüle am unteren Ende

TL: Länge in der Mittellinie vom Schildansatz bis zum unteren Kanülenende

PL: proximal länger

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 370-2.5**

Weitere Informationen und unser neues Produktvideo
finden Sie auf unserer Webseite www.tracoe.com

